


AATOSの使い方

操作は簡単

- ① 電極を体に取り付ける

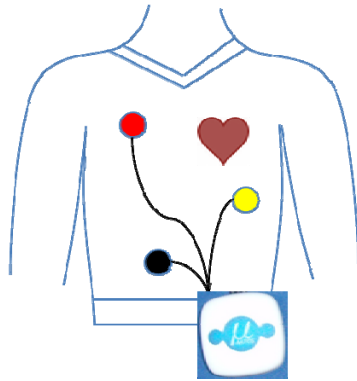

- ② 携帯端末の電源を入れる。AATOSアプリケーションを起動する。

- ③ ID・生年月日・性別・体重・身長・最高血圧を入力する。

※測定者が同一人物である場合は2回目より体重・最高血圧のみ入力。

- ④ 測定開始を押す。
- ⑤ 約 2 時間測定し、測定されたデータが自動的に医師へ送信される。
- ⑥ データが全部送信された後、携帯電話の電源を切ることができる。

注意事項 !

- 測定する前に、測定器と携帯電話をフル充電してください。
- 測定器と携帯電話の距離は間に部屋の壁がないところで、10メートル以内にしてください。
- 心電図を測った後、すぐに携帯電話の電源を切らないでください。医師にデータが全部送信されてから携帯電話の電源を切ることができます。